

Audinor DUO

Quick Guide



Mikrofon

Modtager

Audinor DUO

Quick Guide

Opladning

Sæt strømkontakten i bunden af enheden. Når en enhed lades op, lyser lampen rødt. Når enheden er fuldt opladet lyser indikatoren grønt.

Tænd/sluk

- Tænd: Tryk og hold tænd/sluk knappen ind i 2 sekunder. Lampen lyser grønt når enheden tændes. Slip knappen når lampen slukker.
- Sluk: Tryk og hold tænd/sluk knappen ind i 2 sekunder. Lampen lyser rødt når enheden slukkes. Slip knappen når lampen slukker.

Lytte

Ved brug af halsslyngen, skal høreapparaterne skiftes til teleslynge programmet. Hvis man ikke har høreapparater, kan man i stedet tilkoble et par almindelige hovedtelefoner.

Lydjustering

Bevæg volumkontrollen opad for at justere niveauet op, og nedad for at regulere niveauet ned.

Tryk volumkontrollen "lige ind" for at aktivere Direkte Dæmpning. Lampen lyser konstant rødt når enheden er dæmpet. Modtageren forbliver dæmpet indtil volumkontrollen aktiveres igen.

Tilkobling af ekstern lydkilde

Man kan tilkoble en ekstern lydkilde til både mikrofon (TV mm) og modtager (iPad, mobiltelefon mm). Den medfølgende lyd kabel kobles til lydkildens hovedtelefon/lydudgang i den ene ende, og til ladekontakten/ audioindgangen i den anden.

Lavt batteri

Ved lavt batteri vil lampen blinke rødt. Lad enheden op når indikatoren for lavt batteri lyser.