

Brugsanvisning

Comfort Digisystem

For bedre hrelse



Dansk



Comfort Audio
PART OF THE PHONAK FAMILY

Opladning

Produkterne bruger genopladelige batterier, og har en drifttid på 6-10 timer. Det tager ca. 2 timer at lade et tomt batteri helt op, når funktionsindikatoren lyser grønt er enheden ladet helt op.


Sluk for enhederne inden opladning, ved at holde on/off knappen inde i ca. 2 sekunder. Se display ved tænd og sluk af enheden.

Information til samtalepartner

Brug Comfort Microphone

Tænd for enheden ved at holde on/off knappen inde i ca. 2 sekunder. Du kan se på displayet om enheden tændes og slukkes.

Mikrofonen er nærmikrofon, der fungerer bedst, når den er placeret indenfor 30 cm. af talerens mund. Comfort Microphone kan fastgøres til tøjet med den indbyggede clips eller hænges rundt om halsen ved hjælp af den medfølgende halssnor.

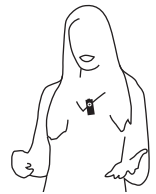

Funktioner Comfort Microphone

Funktionsindikator - *Blinker grønt hver 3. sekund ved normal drift. Blinker langsomt rødt når svagt batteri.*




Information til dig


Brug Comfort Receiver

Tænd og sluk Comfort Receiver ved at holde on/off knappen inde i ca. 2 sekunder. Se display ved tænd og sluk af enheden.

Volumen kan justeres på volumeknapperne. De øvrige knapper kan deaktiveres.

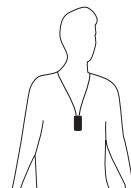

Funktioner Comfort Receiver

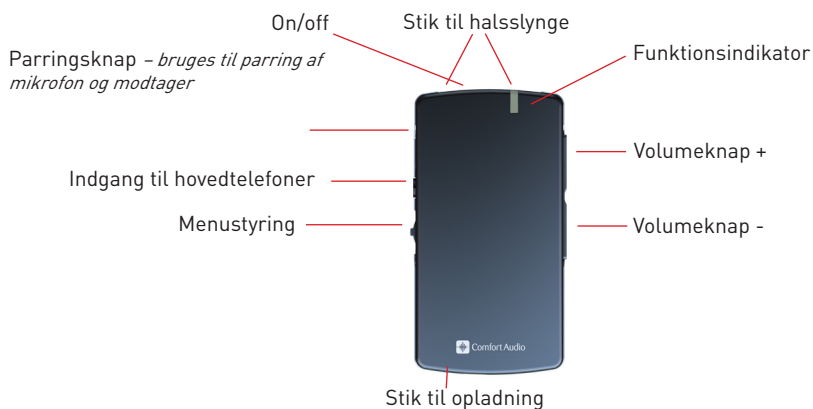

Service og garanti

Comfort Audio tilbyder en omfattende garanti på 3 år fra leveringsdato, som dækker alle fabrikations- og materialefejl. På batterier samt ledninger er garantien 1 år. Læs mere om service og garanti, samt den komplette brugsanvisning på den medfølgende USB-nøgle eller på www.comfortaudio.dk.

Kontakt Comfort Audio hvis du har spørgsmål til brug af udstyret.



Comfort Audio
PART OF THE PHONAK FAMILY

**Fremstillet af:
Comfort Audio AB**

Box 154, SE-301 05 Halmstad, Sweden
Tlf. +46 35 260 16 00
info.halmstad@phonak.com | www.comfortaudio.com

**Forhandles i Danmark af:
Comfort Audio ApS**

Østre Hougvej 42-44, DK-5500 Middelfart
Tlf: +45 33 78 03 02
info.wireless@phonak.dk | www.comfortaudio.dk