

Oticon ♦ Amigo



BRUGSANVISNING
AMIGO ARC

oticon
PAEDIATRICS

Vigtig meddelelse

Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger om funktionalitet og brug.

Indhold

| | |
|--|-----------|
| Indledning | 4 |
| Pakkens indhold | 5 |
| Sådan kommer du i gang | 6 |
| Hvad kan du få forbindelse til med Amigo Arc? | 6 |
| Oversigt | 7 |
| Opladning af batteri | 8 |
| Brug af Amigo Arc | 9 |
| Sådan fungerer LED-indikatorerne | 10 |
| Sådan fungerer knapperne | 12 |
| Tænd/sluk/søg-knap | 12 |
| Volumen op og ned | 13 |
| Lydindikatorer | 14 |
| Intelligent hukommelse til gavn for dig | 15 |
| Udskiftelige skaller | 16 |
| Synkronisering af Amigo Arc | 17 |
| Rengøring af Amigo Arc | 18 |
| Bilag A: Fejlfinding | 21 |
| Amigo Arcs funktioner | 22 |
| Advarsler og forholdsregler | 24 |

Indledning

Tak fordi du valgte Amigo Arc som din modtager med hals-slynge.

Amigo Arc tilhører produktfamilien Amigo FM fra Oticon – en virksomhed, der stiler mod at levere enestående løsninger til skole- og hjemmebrug.

Amigo-familiens utrolige alsidighed gør livet langt nemmere i akademiske, faglige og sociale lyttemiljøer.

Amigo-sendere og –modtagere er kompatible med de fleste typer bag-øret-høreapparater og med cochleare implantater. Amigo Arc kan også bruges til i-øret-apparater, som har en telespole.

Pakkens indhold

Amigo Arc



Udskiftelige skaller

AUX-kabel



USB-ledning



Oplader



Brugsanvisning



Sådan kommer du i gang


Hvad kan du få forbindelse til med Amigo Arc?

Amigo Arc kan bruges sammen med apparater med en telespole, dvs. bag-øret-, RITE- og i-øret-høreapparater samt cochleare implantater og benforankrede høresystemer, og med hovedtelefoner til mennesker med CAPD.

Amigo Arc kan også arbejde sammen med alle Amigo-sendere og med de fleste andre mærker af FM-sendere.

Du kan forbinde Amigo Arc til udstyr som for eksempel mp3-afspillere ved hjælp af et ekstra kabel og stik.

Overzicht

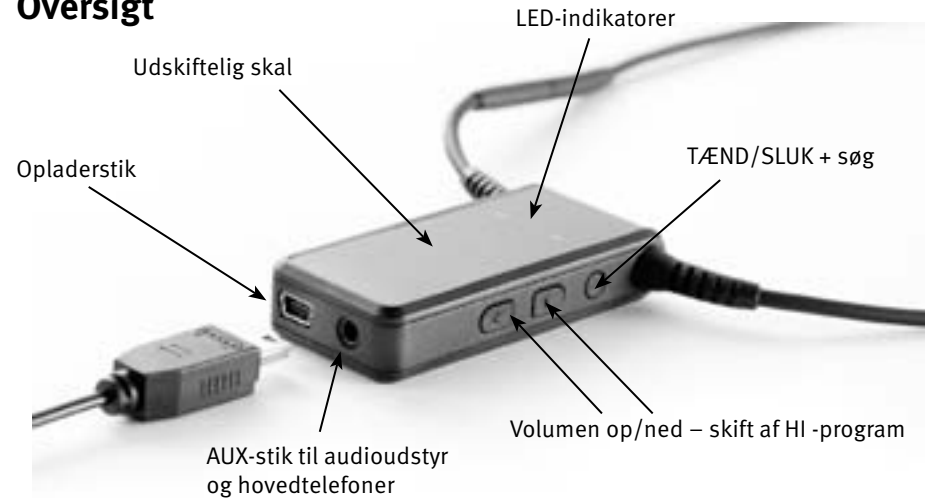

Opladning af batteri

Amigo Arc bruger et indbygget genopladeligt batteri, som skal oplades i 4 timer, før det bruges første gang. For at oplade batteriet skal du fjerne AUX-kablet, hvis det er tilsluttet, og sætte opladeren i stikket som vist på billedet herunder. Det tager 1½ time at oplade Amigo Arc 80% og 2½ time at oplade det helt.



Under opladningen vil Amigo Arc automatisk være slukket.
Bemærk: Amigo Arc kan også oplades fra en pc via det medfølgende USB-kabel.

Brug af Amigo Arc

Amigo Arc er designet til at bæres rundt om halsen. Du tager Amigo Arc på ved at åbne slyngen ved låsen (se nedenfor), komme den rundt om halsen og lukke låsen igen.



Sådan fungerer LED-indikatorerne

Amigo Arc har to LED-indikatorer, én som viser, om den modtager et FM-signal, og én som angiver batteristatus.

LED-indikator for FM:

Konstant rød ●
Tændt og modtager FM-signalet.

Blinker tre gange ●●●
Synkroniserings- og tilpasningskommando accepteret.

Intet lys ●
Slukket, fejl, dårligt signal eller audiostik forbundet.



Den batteriformede LED-indikator viser batteristatus for Amigo Arc.

Konstant rød ●
Batteri opladet og modtager tændt.

Blinker hurtigt rød ●
Lavt batteri.

Blinker langsomt rød ●
Batteri oplader. Når batteriet er fuldt opladet, skifter LED-indikatorerne til konstant rød.

Intet lys ●
Batteri tomt – modtageren slukker.

Bemærk: LED-indikatorerne kan om nødvendigt slås fra.

Sådan fungerer knapperne

Tænd/sluk/søg-knap

Tænd/sluk-knappen har et dobbelt formål, da den også fungerer som søge-knap.

Tryk på TÆND/SLUK-knappen i 2 sek. for at tænde modtageren. Du vil høre et opstarts-bip.

Batteriets LED vil lyse konstant rød. ●

Tryk på TÆND/SLUK-knappen i 2 sek. for at slukke modtageren.

Kanalsøgning

Du kan søge efter aktive FM-kanaler ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Amigo Arc bipper, når den møder en aktiv FM-kanal, og sender et bip som bekræftelse, når den bliver koblet til den kanal, du har valgt.

Bemærk: Søgefunktionen kan slås fra til små børn.

Volumen op og ned

Tryk kort på knappen med pil op for at skrue op til den ønskede volumen.

Tryk kort på knappen med pil ned for at skrue volumen ned.



Amigo Arc bipper, når der skrues op eller ned for volumen. Standardniveauet for volumen angives også med et dobbeltbip, hvis bilyde er slået til.

På trådløse Oticon høreapparater vil et langt tryk på volumen op/ned-knappen skifte lytteprogram.

Bemærk: Begge funktioner kan slås fra til små børn.

Lydindikatorer

Amigo Arc har en lydindikator, som udsender en biplyd, når en indstilling er blevet ændret.

Amigo Arc bipper én gang, hver gang volumen skrues et trin op eller ned. Når standard-niveauet nås, udsendes et dobbeltbip.

Hvis skannefunktionen er slået til, vil Amigo Arc derudover udsende et bip hvert sekund under skanningen. Når der kobles til en FM-kanal, udsendes der to bip.

Bemærk: Biplyde kan om nødvendigt slås fra.

Intelligent hukommelse til gavn for dig

Amigo Arc tilbyder tre typer volumenindstillinger, så du kan få de indstillinger, der matcher dine personlige præferencer.

De tre indstillinger er:

1. Standardbrug, hvor FM-signalet sendes til telespolen
2. Forbindelse fra f.eks. en mp3-afspiller til AUX-jackstikket
3. Forbindelse fra hovedtelefoner til AUX-jackstikket

Hvis du skruer volumen to trin op, når du lytter til f.eks. en mp3-afspiller, vil Amigo Arc automatisk huske dette, næste gang du bruger din musikafspiller.

Udskiftelige skaller

Amigo Arc leveres med fem skaller i forskellige farver. Det er nemt at udskifte dem.



Start med at trykke en fingernegl ind i åbningen øverst på skallen og vrid den derefter løs i begge sider.



Bemærk: Brug aldrig overdreven kraft, når du skifter faceplate.

Synkronisering af Amigo Arc

Tjek, at Amigo Arc er tændt, før du synkroniserer.

Tryk på SYNC-knappen på Amigo T20/T21/WRP inden for en afstand af cirka 50 cm. LED'en på senderen vil derefter blinke tre gange, og SYNC-logoet vil komme frem på skærmen. Hvis synkroniseringen lykkes, blinker LED'en for FM på Amigo Arc tre gange.

Bemærk: Amigo Arc kan også søge efter aktive FM-kanaler – se side 12.

Rengøring af Amigo Arc

Amigo Arc er lavet i et vandafvisende materiale. Den rengøres ved at tørre den af med en fugtig klud. Brug ikke alkohol eller lignende.

Amigo Arc må ikke lægges i vand eller andre væsker.

Gå ind på www.amigofm.com, hvor du finder en komplet vejledning i kompatibilitet.



International garanti

Din Amigo Arc har en begrænset produktgaranti i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl på selve Amigo Arc, men ikke tilbehør som hovedtelefoner og kabler osv. Garantien dækker IKKE skader grundet fejlagtig håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af uautoriseret tredjepart, ætsning, eller af fremmede objekter inde i enheden eller forkerte indstillinger.

Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Nationale aftaler kan betyde, at garantien er udvidet i forhold til ovenstående.

Kontakt høreklubben for yderligere oplysninger.

Bilag A: Fejlfinding

| | |
|-------------------------------|---|
| Ingen lyd/ingen FM-modtagelse | Oplad batteriet. Tjek, at Amigo Arc er på den ønskede kanal. Tjek, at høreapparatets telespoleprogram er valgt. |
| LED-indikatorer slukket | Tjek, at batteriet er opladet. Tjek, at Amigo Arc er på den ønskede kanal. Tjek, at LED-indikatorerne er slået til under tilpasningen af Amigo Arc. |
| Periodisk eller reduceret lyd | Gå væk fra potentielle støjkilder. Tjek, at der ingen andre sendere er, som sender på samme FM-kanaler. |

Kontakt din høreklub, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med fejlfinding, eller hvis du har brug for svar på andre spørgsmål. Eller gå ind på www.oticon.dk, hvor kan finde en guide til fejlfinding for Amigo.

Amigo Arcs funktioner

| Funktion | Sådan gør du |
|-----------------------------------|--|
| Skanning for aktive FM-kanaler | Et kort tryk på tænd/sluk-knappen får Amigo Arc til at skanne for at finde FM-kanaler. Amigo Arc vil koble sig til den første aktive FM-kanal, den finder på sin liste over kanaler. |
| Volumen | Tryk på ▲ eller ▼ for at skrue op eller ned for volume. |
| Synkronisering af Amigo Arc | Amigo Arc kan synkroniseres ved hjælp af en Amigo T30/T21/WRP eller Amigo eZync. |
| Udskiftning af de farvede skaller | Amigo Arc leveres med 5 skaller i forskellige farver, som er nemme at udskifte (se nærmere på side 16). |

Hvis din Amigo Arc har brug for service

Tag kontakt til din høreapparattilpasser, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer.

Garantibevis

Brugerens navn: _____

Høreapparattilpasser: _____

Klinikkens adresse: _____

Klinikkens tlf. nr.: _____

Leveringsdato: _____

Garantiperiode: _____ Måned: _____


Serienummer: _____

Produktgodkendelse, forholdsregler og mærkninger

Amigo Arc indeholder en radiosender, der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer ved 3,7 MHz.

Senderens magnetiske feltstyrke er $< -30\text{dBuA/m@ } 10\text{m}$.

Sendestyrken for Amigo Arc ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er Amigo Arcs stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra f.eks. hårtørrere, elektriske barbermaskiner osv. Amigo Arc overholder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

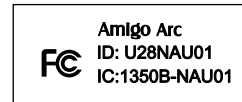

Enheden er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada. Brug er underlagt følgende to betingelser:

- Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
- Enheden skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket brug.

Ændringer eller justeringer af udstyret, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Oticon, kan annullere FCC's autorisation til at bruge udstyret.

BEMÆRK: Udstyret er blevet testet og opfylder kravene vedrørende grænserne for digitalt udstyr i klasse B ifølge afsnit 15 i FCC-reglerne. Grænserne er fastsat for at beskytte mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens af radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret er årsag til generende interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde for udstyret, kan du forsøge at afhjælpe problemet på en af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Anbring udstyret og modtageren længere fra hinanden.
- Slut udstyret til et andet netstik end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Advarsler og forholdsregler

Amigo Arc er ikke legetøj og skal derfor holdes uden for rækkevidde af små børn og alle andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade dem selv.

Hold især øje med de små komponenter, så børn ikke sluger eller tygger på dem, eller kommer jackstikket i munden. Søg straks læge, hvis en del sluges.

Sikkerheden ved brug af Amigo Arc med AUX-inputkabel afhænger af den eksterne lydkilde. Når inputkablet er koblet til et apparat tilsluttet elnettet, skal dette apparat overholde kravene i IEC-60065, IEC-60601 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Sikkerheden ved genopladning af batterier med et USB-stik alene afhænger af det eksterne udstyr. Når USB-stikket er koblet til et apparat tilsluttet elnettet, skal dette apparat være UL-godkendt eller overholde tilsvarende sikkerhedskrav.

Amigo Arc vil holde op med at fungere, hvis batterierne løber ud. Systemet kan også frembringe en høj hyletone, hvis batteriet er lavt. Du skal som bruger være opmærksom på ikke at forveksle disse lyde med advarselslyde – f.eks. dyttende biler i trafikken.

Vær særlig forsigtig, når menneske med normal hørelse bruger Amigo Arc med hovedtelefoner. Hvis hovedtelefonerne bruges ved høj volumen kan der opstå tinnitus og høretab.

Sæt volumen til et sikkert niveau og undgå at skrue op for volumen for at lukke støj eller talende mennesker i nærheden af dig ude.

Udsæt aldrig Amigo Arc for kraftig varme ved at putte den i ovn, mikrobølgeovn eller brænde den. Den kan eksplodere og forårsage alvorlige skader.

Forstyrrelser

- Amigo Arc er udviklet til at leve op til de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Amigo Arc kan imidlertid forårsage interferens med andet elektromedicinsk udstyr såsom defibrillatorer og pacemakere. Kontakt derfor venligst producenten af dit implanterede udstyr for nærmere information om risikoen for forstyrrelser. Interferens kan også skyldes forstyrrelser i elektriske luftledninger, metaldetektorer i lufthavne, elektromagnetiske felter fra andet medicinsk udstyr og elektrostatisk afladning.

Mulige bivirkninger

- I Amigo Arc kan der være materialer, som ellers ikke er allergene, men som i sjældne tilfælde kan give hudirritationer.

Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger.

Emissioner

- Sendestyrken for Amigo Arc ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er Amigo Arcs stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra f.eks. hårtørrere, elektriske barbermaskiner osv. Amigo Arc overholder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

Brug i bil:

Brug af Amigo Arc sammen med en mobiltelefon under kørslen kan distrahere dig. Hvis det er muligt, skal du finde et sted at parkere, før du foretager eller besvarer opkald.

Brug på fly

Amigo Arc bør ikke bruges på fly uden at der er givet tilladelse af flyets personale.

Brug af slyngen

Hvis nakkestroppen ved et uheld fanges af noget, mens du har den på, er den konstrueret, så den automatisk brydes. Forsøg derfor aldrig at afkorte eller ændre nakkestroppen på uautoriseret måde.

Oticon erklærer hermed, at Amigo Arc er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Overensstemmelseserklæring fås hos:

Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
www.oticon.dk

CE 0682



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.



NI 175



10007500001

oticon
PAEDIATRICS