



Operating range  
Betriebsreichweite  
Plage de fonctionnement  
Rango de funcionamiento

Roger microphone (e.g. Roger inspiro)  
Roger-Mikrofon (z.B. Roger inspiro)  
Microphone Roger (p. ex. Roger inspiro)  
Micrófono Roger (ej. Roger inspiro)




⚠ Out of range! If distance greater than 20 meters/65 feet  
Ausser Reichweite! Wenn der Abstand größer als 20 Meter ist  
Hors de portée! Si distance supérieure à 20 mètres  
¡Fuera de alcance! Si la distancia es mayor que 20 metros




Audio connection  
Audio-Anschluss  
Connexion audio  
Conexión de audio

Roger DigiMaster

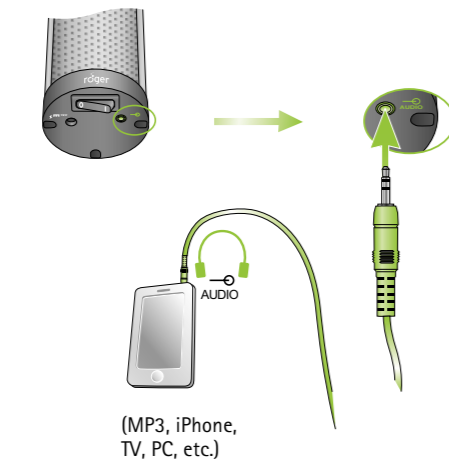

Network compatibility  
Netzwerk-Kompatibilität  
Compatibilité avec le réseau  
Compatibilidad con las redes

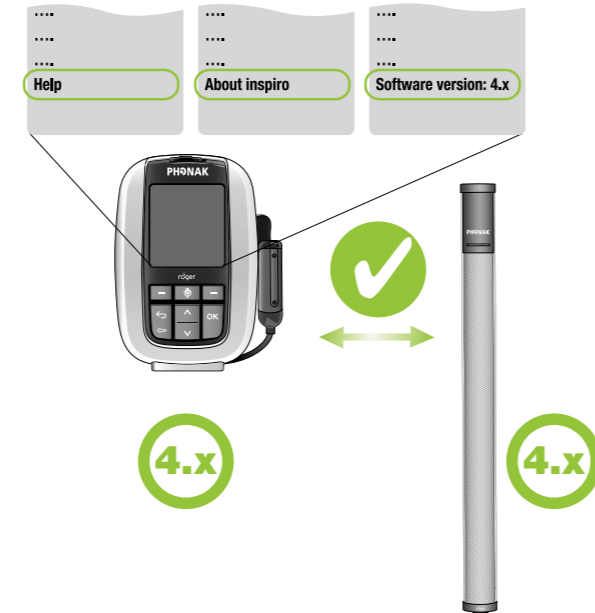

Network compatibility  
Netzwerk-Kompatibilität  
Compatibilité avec le réseau  
Compatibilidad con las redes

⚠ Roger DigiMaster software version 4.x is only compatible with other devices running software version 4.x or later. Use Roger inspiro to check Roger DigiMaster's firmware version.


In einem Netzwerk ist die Roger DigiMaster Software-Version 4.x nur mit anderen Geräten kompatibel, die ebenfalls über die Version 4.x verfügen. Verwenden Sie Roger inspiro um die Roger DigiMaster Software-Version zu überprüfen.

Dans un réseau, la version logiciel 4.x du Roger DigiMaster est seulement compatible avec des appareils ayant la version 4.x ou plus élevée. Utilisez Roger inspiro pour vérifier la version logiciel du Roger DigiMaster.

Dentro de una red, la versión de software 4.x de Roger DigiMaster sólo es compatible con otro dispositivo que utilice la versión de software 4.x o posteriores. Utilice Roger inspiro para comprobar la versión de software de Roger DigiMaster.



Indicator light (LED status)  
Optische Anzeige (LED-Status)  
Témoin lumineux (LED status)  
Indicador de luminoso (LED status)

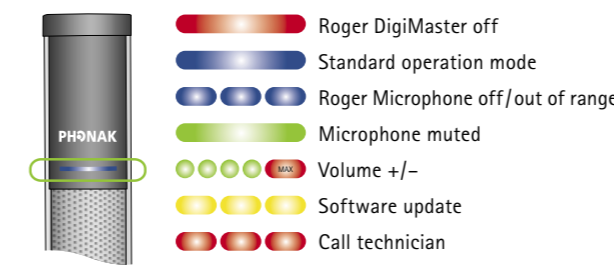

Operating conditions  
Betriebsbedingungen  
Conditions de fonctionnement  
Condiciones de funcionamiento

+0° to +40° Celsius / +32° to +104° Fahrenheit  
<95% (non condensing) relative humidity/relative Luftfeuchtigkeit/  
humidité relative/ humedad relativa.

**Manufacturer:**  
Phonak Communications AG  
Laenggasse 17  
CH-3280 Murten  
Switzerland

**EU Representative:**  
Phonak GmbH  
D-70736 Fellbach-Oeffingen  
Germany

www.phonak.com/roger

025-31631/1.00/2013-04/A+W Printed in Switzerland © Phonak AG All rights reserved




**PHONAK**  
life is on

Start

Components and functions  
Komponenten und Funktionen  
Composants et fonctions  
Componentes y funciones


Roger DigiMaster

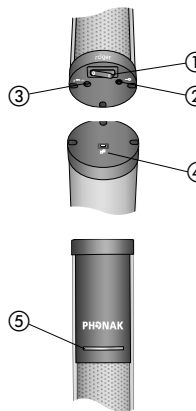

- ① On/off
- ② 3.5 mm audio input
- ③ Power socket
- ④ Mini-USB
- ⑤ Indicator light (LED)

Power supply  
Stromversorgung  
Alimentation  
Alimentación

- ① Power supply
- ② US and EU cable

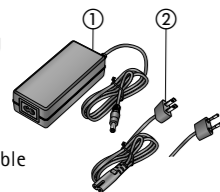


Package contents may vary slightly depending on your country  
Packungsinhalt kann je nach Land variieren  
Le contenu peut varier selon les pays  
El contenido puede variar en función del país


Start

Components and functions  
Komponenten und Funktionen  
Composants et fonctions  
Componentes y funciones


Option:  
DigiMaster Floor stand + bag

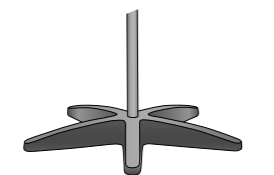

Option:  
Wall mount kit

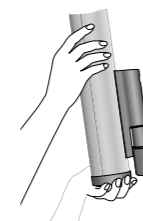


Option:  
UK and AU cable

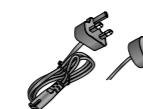


1

Mains  
Stromversorgung  
Alimentation  
Alimentación

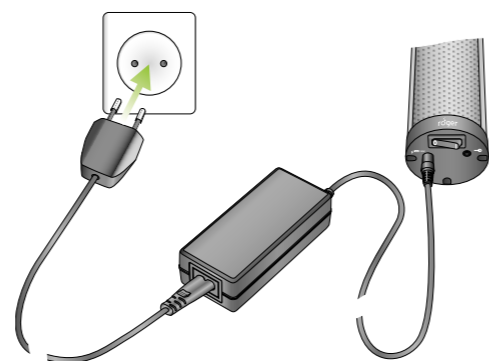


2

Switching Roger DigiMaster on  
Roger DigiMaster einschalten  
Enlencer Roger DigiMaster  
Encender el Roger DigiMaster

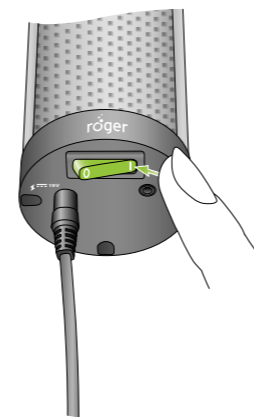

3

Connecting Roger DigiMaster to Roger inspiro  
Roger DigiMaster mit Roger inspiro verbinden  
Connecter Roger DigiMaster avec Roger inspiro  
Conexión de Roger DigiMaster con Roger inspiro

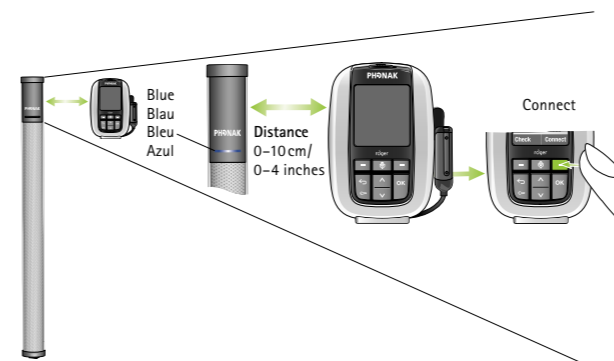

⚠ Connect Roger DigiMaster to Roger inspiro before first use (Connect).


Verbinden Sie Roger inspiro mit Roger DigiMaster vor der ersten Inbetriebnahme (Connect).

Connecter Roger DigiMaster avec Roger inspiro avant la première utilisation (Connect).


Conecte Roger DigiMaster con Roger inspiro antes del primer uso (Connect).

3

Connecting Roger DigiMaster to Roger inspiro  
Roger DigiMaster mit Roger inspiro verbinden  
Connecter Roger DigiMaster avec Roger inspiro  
Conexión de Roger DigiMaster con Roger inspiro

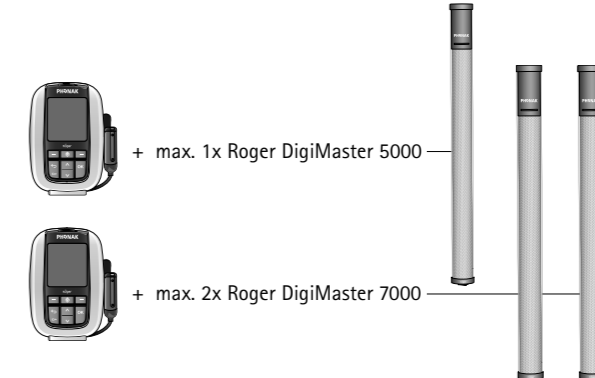


Display indicator

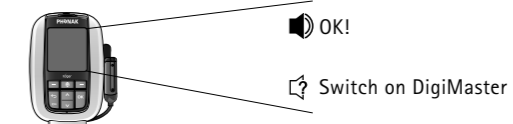

4

How to use Roger DigiMaster  
Roger DigiMaster benutzen  
Comment utiliser Roger DigiMaster  
Cómo utilizar Roger DigiMaster

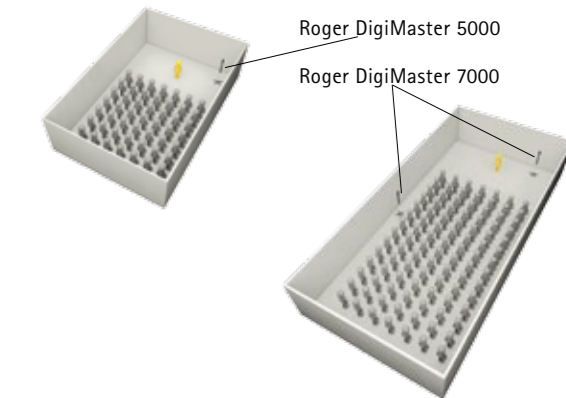

⚠ Same loudspeaker position whether using floor stand or wall mount.

Gleiche Lautsprecherposition mit Stativ oder Wandmontage.

Même position des haut-parleurs avec le pied ou la fixation murale.

Misma posición del altavoz ya sea sobre el soporte de pie o instalado en la pared.