

Audinor A2

SoundField højttaler

Quick Guide



Audinor A2 er en aktiv SoundField højttaler specielt udviklet til brug i skolen. Designet gør, at lyden spredes effektivt over et større område og kan dermed formidles til flere personer. Højttaleren er let at tage med og har et genopladeligt batteri med lang driftstid. Audinor A2 bruges sammen med en Audinor trådløs sender tilkøbet boommikrofon.

Højttaleren er beregnet til indendørs brug.

Audinor A2


SoundField højttaler

Quick Guide

Opladning

Højttaleren bør lades op før brug. Hvis batteriet er helt tomt, vil det tage indtil 8 timer at lade op. Lampen på strømforsyningen lyser rødt når enheden oplades og grønt når enheden er fuldt opladet. Enheden kan bruges under opladning.

Højttalerens bagplade

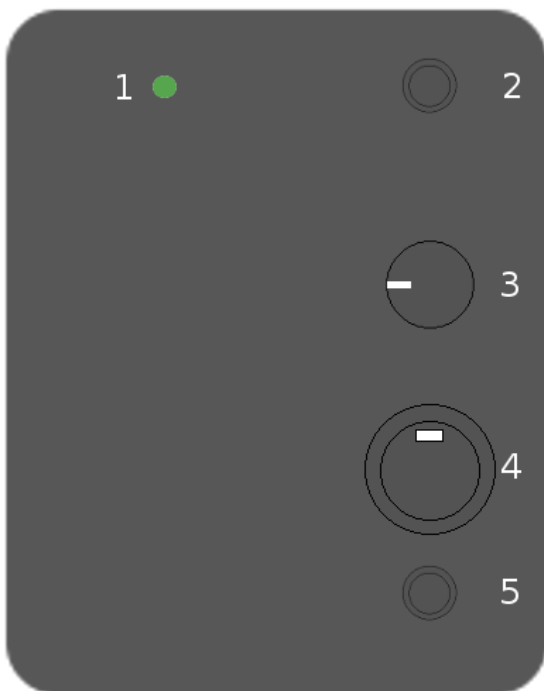

1. Lampe
2. Knap for parring
3. Volumenkontrol
4. Tænd "I" / Sluk "O" vippebryder
5. Ladestik

Tænd/sluk

Tænd/sluk vippebryderen (4). Lampen (2) vil blinke når enheden er tændt.

Lyd

Tag boommikrofonen på, og tænd for senderen. Skru forsigtigt op på volumenkontrollen til ønsket lydstyrke. Sørg for at holde en vis afstand til højttaleren og/eller skru ned for lydstyrken for at reducere risiko for akustisk tilbagekobling (feedback).

Rengøring af højttaleren

Rengør enheden med en helt tør klud. Fronten på højttaleren kan tages af og rengøres separat. Den klikkes på igen og holdes på plads ved hjælp af magneter.